

EVER clean®



- 1 No es necesario frotar
- 2 Limpia y desinfecta las lentillas
- 3 Para todo tipo de lentes, incluidas las hidrogel de silicona y las Ortho-K
- 4 Peróxido + comprimido bicapa
- 5 Sin conservantes
- 6 Eliminación completa de proteínas y depósitos



Acción en 2 horas




Eliminación de Proteínas



Sin frotar

Datos técnicos:

REACCIÓN DE LA CAPA VERDE

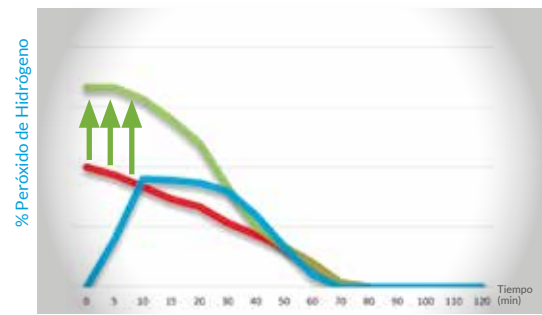

- Curva de neutralización normal del sistema peróxido
- Concentración del peróxido activado por EVER CLEAN (interpretación de resultados)
- Efecto SELF ACTION

Sistema de limpieza,
desinfección y eliminación
de proteínas en 2 horas

Actúa mejor y más rápido que las soluciones únicas.

En 2 horas se obtiene el más alto rendimiento en limpieza y desinfección.

El comprimido bicapa después de eliminar las proteínas, limpiar y desinfectar las lentas, convierte el peróxido de hidrógeno en una solución salina inocua para los ojos con una tonalidad verdosa que indica que el comprimido se ha añadido.


Datos Eficacia:

Eficaz en limpieza:




Fotografías de las lentes empleadas por los usuarios durante el estudio y limpiadas con las soluciones indicadas. Realizadas en un laboratorio alemán en colaboración con ioba


REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE BACTERIAS

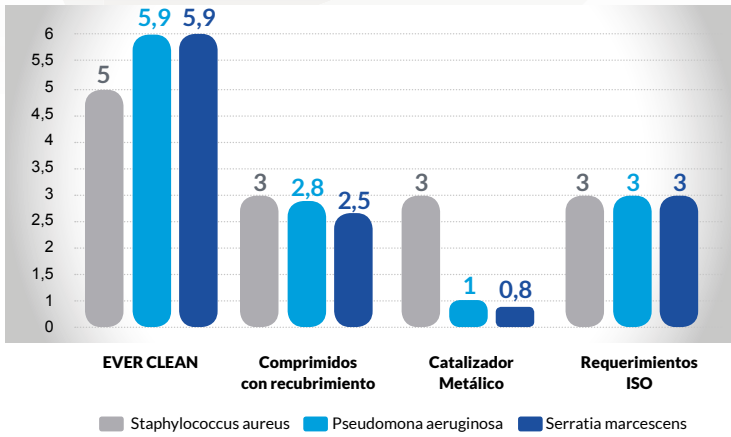

REDUCCIÓN LOGARÍTMICA DE HONGOS

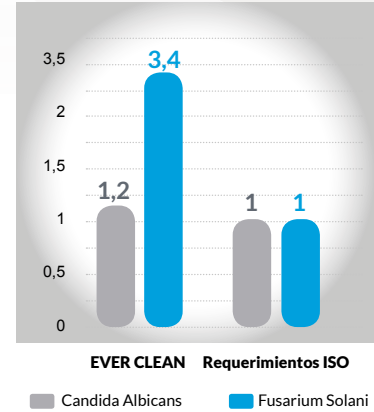


Más confort durante más tiempo comparando con otras soluciones

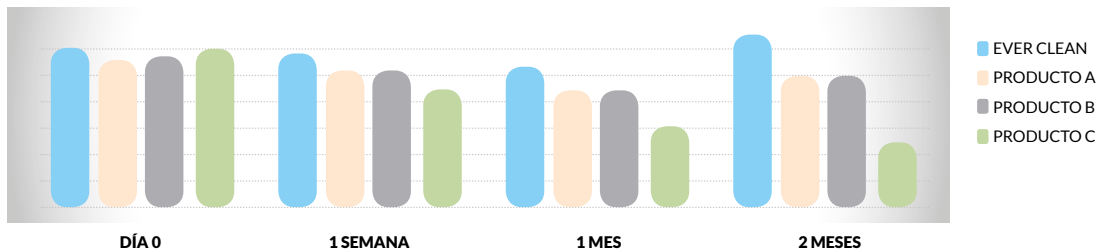

El Sistema Ever Clean:


- La solución de peróxido de hidrógeno al 3%.
- El Comprimido Bicapa:

1/5 de capa con un agente removedor de proteínas

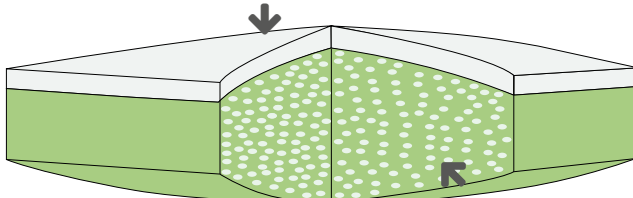

4/5 de capa:

- Tampón Borax/Bórico: para mantener el pH en el ojo, al 7,2.
- Cloruro Sódico: dota a la solución de una osmolaridad similar a la lágrima.
- Catalasa: enzima que cataliza la conversión de H_2O_2 en agua y oxígeno.
- Clorofilina y riboflavina: Indica que el comprimido ha sido añadido, dando un tono verdoso.

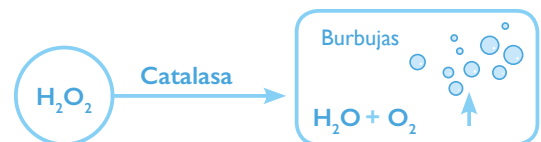

Agente que forma una matriz permitiendo una disolución prolongada, la desinfección y la neutralización del H_2O_2