

Unica Sensitive[®] es una solución única destinada al mantenimiento diario de todo tipo de lentes de contacto blandas. Contiene Ácido Hialurónico y Povidona, que aportan una excelente capacidad humectante y lubricante. Recomendado para usuarios con ojos sensibles gracias a la baja concentración de conservantes.



FUNCIONES:

- Limpieza
- Desinfección
- Humectación y lubricación
- Aclarado
- Conservación

COMPOSICIÓN:

- Tampón: Borax-Bórico
- Lubricantes: Hialuronato de Sodio y Povidona
- Agente Quelante: EDTA
- Surfactante: Poloxamer
- Conservante: Polihexanida (PHMB) 0.0001%

PROPIEDADES:

I. ALTA HUMECTABILIDAD

El Hialuronato de Sodio y la Povidona son lubricantes que proporcionan:

- Viscoelasticidad
- Propiedades antioxidantes
- Gran capacidad de retención de agua y mayor humectación.

II. EFICACIA EN LIMPIEZA


El Poloxamer es un agente surfactante que reduce la tensión superficial de la solución para facilitar la eliminación de los depósitos en forma de micelas gracias a la acción mecánica del parpadeo.



III. EFICACIA EN DESINFECCIÓN

La PHMB proporciona una gran actividad antimicrobiana contra hongos, bacterias y Acanthamoeba sin un modo específico de acción, lo que dificulta que se puedan desarrollar mecanismos de resistencia al compuesto.

STAND ALONE TEST

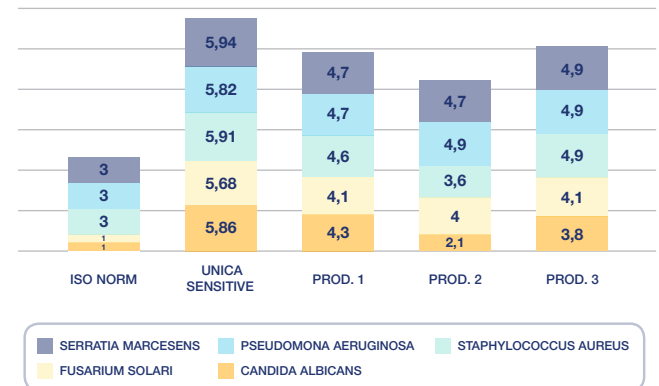

Resultados Unica Sensitive proporcionados por laboratorios independientes. Para las otras soluciones, los resultados han sido extraídos de las web de las respectivas empresas.

TEST ACANTHAMOEBA

