

EVER  
clean®  
SCLERAL

# EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO MÁS INNOVADOR PARA LENTES ESCLERALES

Solución de Peróxido de hidrógeno al 3% con comprimidos neutralizantes.  
Contiene un nuevo portalentes diseñado para lentes esclerales  
de gran diámetro y altura sagital.

SIN  
CONSERVANTES



AVIZOR  
EYE CARE SOLUTIONS

## 1


### DESINFECCIÓN

SIN FROTAR  
NI ACLARAR

## EFICACIA GARANTIZADA GRACIAS AL SISTEMA EVER CLEAN

Ever Clean Scleral proporciona una gran actividad antimicrobiana contra hongos, bacterias y Acanthamoeba.

### EFICACIA DESINFECTANTE CONTRA BACTERIAS Y HONGOS

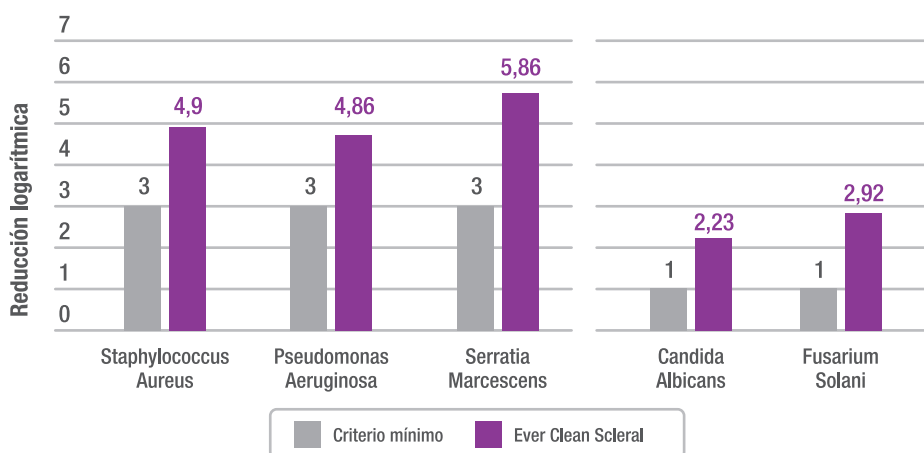

Resultados de Ever Clean Scleral llevados a cabo por el laboratorio Biolab (Madrid)

### EFICACIA EN DESINFECCIÓN FRENTE A ACANTHAMOEBA

Porcentaje de eliminación de la Acanthamoeba Castellanii y Polyphaga

#### ACANTHAMOEBA CASTELLANII

99,99%

Trofozoito

98,22%

Quiste

#### ACANTHAMOEBA POLYPHAGA

99,90%

Trofozoito

95,32%

Quiste

Resultados llevados a cabo por la universidad de Alcala (Madrid)

## 2

### LUBRICACIÓN

## CONTIENE POVIDONA, LUBRICANTE QUE MEJORA EL CONFORT DEL USUARIO

Este polímero es un eficaz agente lubricante y humectante de larga duración que contribuye a la estabilidad de la película lagrimal, aportando más confort al usuario de lentes de contacto.

**EVER  
clean<sup>®</sup>**  
**SCLERAL**

**SIN  
CONSERVANTES**


**3**

**LIMPIEZA**


## ELIMINACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LOS DEPÓSITOS EN LAS LENTES

El gran tamaño de las lentes esclerales hace que su limpieza sea compleja. Los profesionales de la salud ocular se decantan por soluciones eficaces en limpieza y libres de conservantes como los peróxidos.

Las lentes que fueron limpiadas con el sistema **Ever Clean**, sin necesidad de frotar ni de utilizar otros productos adicionales, no presentaron depósitos de proteínas o lípidos.

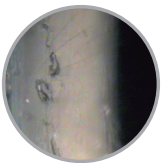


MPS1

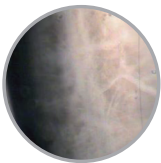

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>



MPS2

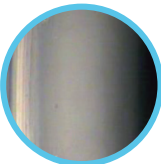

Ever Clean

> Fotografías de las lentes empleadas por los usuarios del estudio y limpiadas con diferentes soluciones de mantenimiento. Realizadas en un laboratorio alemán en colaboración con el IOBA. (Avizor Data).


**Ever Clean Scleral** es un producto que garantiza su uso con total comodidad, eficacia y seguridad para todos los tamaños de lentes esclerales.



**Proceso de desinfección, limpieza y neutralización en 2 HORAS**

**4**

**COMPRIMIDO**

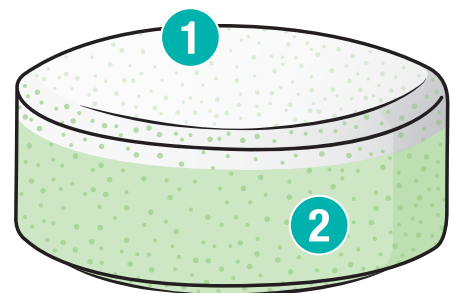

**1**

**CAPA BLANCA (SELF-ACTION)**

Las proteínas y los depósitos adheridos a la superficie de la lente se eliminan en cada uso gracias a la enzima proteolítica.

**2**

**CAPA VERDE**

Con un agente específico que permite una liberación prolongada de la catalasa y un control en la desinfección y neutralización del H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Con Povidona lubricante que aporta mayor confort al usuario.


Con Riboflavina y Clorofilina: Indicadores de color

# 5

## PORTALENTES

### NUEVO DISEÑO PARA LENTES ESCLERALES

Diseñado específicamente para una colocación sencilla y práctica del comprimido.

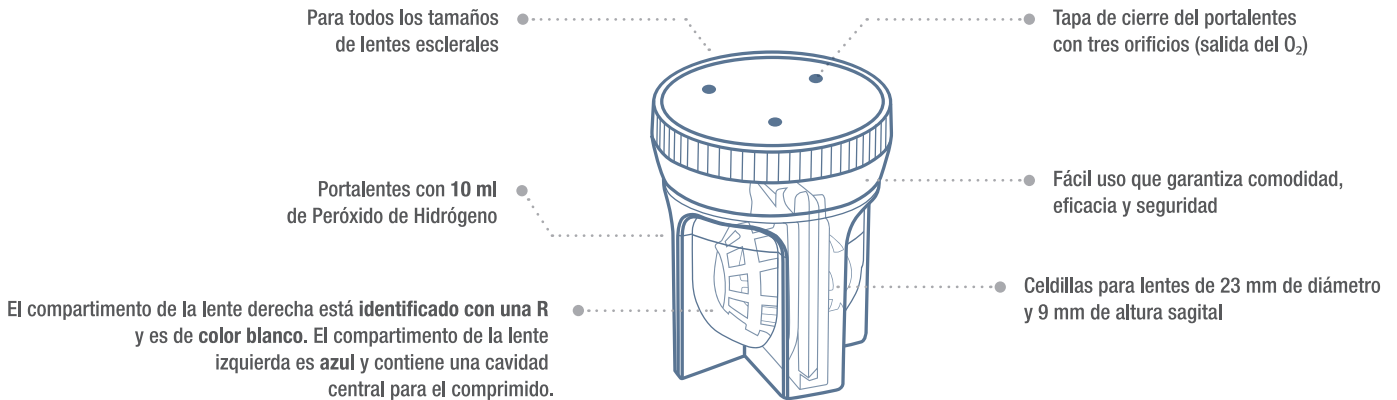


# 6

## MODO DE EMPLEO

### MÉTODO MUY FÁCIL

1. Llene el portalentos con la solución desinfectante **Ever Clean Scleral** hasta la línea indicada (10 ml).
2. Coloque las lentes esclerales en las celdillas izquierda y derecha del portalentos y cierre cada celdilla.
3. Coloque un comprimido limpiador/humectante/neutralizante **Ever Clean Scleral** en el hueco disponible en el centro de la celdilla azul (izquierda) del portalentos.
4. Coloque la tapa del portalentos dentro del vaso y cierre el estuche. Agite suavemente el portalentos de arriba abajo para asegurarse que el interior del mismo se desinfecta.
5. **NEUTRALIZACIÓN.** Deje las lentes inmersas y al final de la neutralización (2 horas) se observará un ligero color verde. Las lentes estarán desinfectadas, limpias, neutralizadas y listas para usar.

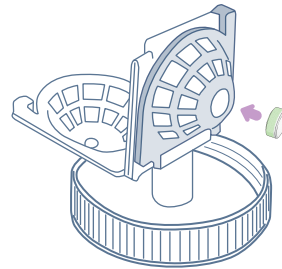

**COLOCACIÓN**

COMPRIMIDO



**DESINFECCIÓN**

PROCESO ACTIVO



**NEUTRALIZACIÓN**

PROCESO COMPLETADO

