

STAT-DRI PLUS

Otimize o processo de secagem de seus instrumentos com o agente de secagem STAT-DRI PLUS.

Otimize sua STATIM®



APRESENTAÇÕES E INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

- 2OZPLUS | Frasco spray de 2 onças ou 59ml
- 8OZPLUST | Frasco de recarga de 8 onças ou 238ml
- 8OZPLUST | Frasco spray de 8 onças ou 238ml
- 32OZPLUS | Frasco de recarga de 32 onças ou 909ml

INDICAÇÕES

Otimize e reduza a fase de secagem em seus cassetes **STATIM®** com o agente de secagem **STAT-DRI PLUS**.

USANDO O AGENTE DE SECAGEM STAT-DRI PLUS

O tratamento das superfícies internas do cassete **STATIM®** com o agente de secagem **STAT-DRI PLUS**, incluso na sua unidade **STATIM®**, melhorará o processo de secagem dos instrumentos. Sendo uma solução surfactante, o revestimento do agente secante **STAT-DRI PLUS** em toda a superfície interna do cassete induz a água a formar uma camada uniforme na superfície interna, sem formação de gotas. A água em contato com as superfícies quentes do cassete também evapora com alta eficiência. As manchas são minimizadas e a secagem dos instrumentais é otimizada.

USOS

Use **STAT-DRI PLUS** para proteger o interior do seu cassete **STATIM®** e reduzir o tempo de secagem.

Adicione **STAT-DRI PLUS** ao dispensador de abrillantador em sua lavadora de instrumentos **HYDRIM®** para obter instrumentos impecáveis e resultados de secagem mais rápidos e eficazes.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparando sua unidade STATIM® para uso

Após limpar e secar o cassete, revista as superfícies internas com STAT-DRI PLUS.

Quando usado entre ciclos

- Limpe as superfícies internas superior (tampa) e inferior (bandeja) do cassete **STATIM®**, com pano macio.
- Enxague abundantemente com água da torneira.
- Assim que o cassete estiver limpo e seco, borrife **STAT-DRI PLUS** sob um pano descartável ou diretamente sobre a superfície e, em seguida, limpe até cobrir uniformemente todas as superfícies internas da tampa e da bandeja do cassete da **STATIM®**.

Quando usado após lavar o cassete.

- Lave o interior do cassete (tampa e bandeja) pelo menos uma vez por semana com detergente neutro que não contenha cloro.
- Esfregue o interior com um pano de limpeza desenvolvido para uso em superfícies revestidas com Teflon™.
- Enxaguar abundantemente com água da torneira para eliminar todos os vestígios de detergente.
- Assim que o cassete estiver limpo e seco, borrife **STAT-DRI PLUS** sob um pano novo, limpo e descartável ou diretamente sobre a superfície e, em seguida, limpe até obter uma cobertura uniforme de todas as superfícies internas da tampa e da bandeja do cassete da **STATIM®**.



- Pulverize STAT-DRI PLUS dentro da bandeja.



- Pulverize STAT-DRI PLUS no interior da tampa.



- Limpe a bandeja para uma cobertura uniforme.



- Limpe a tampa para uma cobertura uniforme.

STAT-DRI PLUS

Otimize o processo de secagem de seus instrumentos com o agente de secagem STAT-DRI PLUS.

Otimize
sua
STAT/IM®



Recomendação de secagem para todas as unidades STAT/IM®

Para proteger o interior do seu cassete STAT/IM® e para melhorar e reduzir o tempo de secagem, o **STAT-DRI PLUS** deve ser sempre aplicado pelo menos a cada 10 ciclos e após cada limpeza do cassete. Você pode borrifar **STAT-DRI PLUS** sobre um pano ou diretamente nas superfícies do cassete, mas evite borrifar sobre os instrumentos.

Recomendação de secagem para placas de secagem STAT/IM® 5000

O cassete STAT/IM® 5000 inclui um rack padrão e um rack adicional com 10 placas de secagem afixadas para aprimorar o processo de secagem de instrumentos embalados. O calor gerado pela fase de esterilização é absorvido pelas placas de secagem e depois transferido diretamente para a carga/envoltórios. Isto então resulta na secagem rápida e acelerada de um cassete STAT/IM® devidamente carregado.

As placas ajustáveis são projetadas para eliminar a necessidade de um rack de instrumentos embalado separadamente. Para instalar e ajustar uma placa de secagem, siga estes passos:

- Segure uma placa na posição desejada, levemente inclinada para frente e com as abas para baixo.
- Insira as abas entre a malha do suporte de instrumentos desembrulhado.

- Cada aba possui um "slot" alongado. Deslize a placa até que o fio esteja no final de cada ranhura.
- Solte a placa para a posição de repouso.
- Preparar e carregar instrumentos para esterilização. A secagem de placas e **STAT-DRI PLUS** é a combinação perfeita para secagem rápida e precisa de instrumentos em sua STAT/IM® 5000.

Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador da STAT/IM®.

